

Centre National de Référence des Virus Respiratoires (dont la grippe)

PROCEDURE POUR ENVOI D'ECHANTILLONS AU CNR

Dans le contexte de la détection du nouveau variant SARS-CoV2 « VUI – 2020 12/01 » détecté au Royaume Uni nous vous sollicitons pour l'envoi aux CNR des échantillons pour lesquels vous observez un défaut de détection par PCR pour le gène S (kit TaqPath COVID-19 de ThermoFisher).

Cette surveillance se met en place de façon prospective à partir du lundi 28/12/2020.

Vous trouverez ci-dessous les informations et recommandations pour l'envoi de ces prélèvements.

En fonction de la localisation géographique de votre laboratoire les échantillons sont à adresser à :

- Nord de la France : régions Ile de France, Haut de France, Normandie, Grand Est, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté, Bretagne.

➡ Envoyer les échantillons à Paris à l'attention de Sylvie Behillil, Vincent Enouf

CNR des Virus des Infections Respiratoires

Institut Pasteur

28 rue du Docteur Roux

75724 PARIS Cedex 15

Dr Sylvie Behillil Tél : 01.40.61.39.03 - Dr Vincent Enouf Tél : 01.45.68.89.70 / Fax : 01.40.61.32.41

- Sud de la France : régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur et Corse

➡ Envoyer les échantillons à Lyon à l'attention de Martine Valette

CNR des Virus des Infections Respiratoires

CBPN - Laboratoire de Virologie – Hôpital Croix Rousse

103 Grande rue de la Croix Rousse

69317 LYON Cedex 04

Dr Martine Valette Tél : 04.72.07.10.31 Sec : 04.72.07.11.42 - Fax : 04.72.00.37.54

Conditions de transport :

- Température de transport : +4°C, -20°C ou carboglace, en fonction de la température de stockage de l'échantillon (si l'échantillon a été congelé, l'envoyer congelé).
- Transporteur : les laboratoires peuvent utiliser les transporteurs agréés pour le transport d'échantillons biologiques (Cerba, Biomnis par exemple).

Sélection des échantillons :

- Ct < 25
- volume d'échantillon : 500 µL minimum
- données associées indispensables:
 - Données prélèvement : N° Dossier interne du laboratoire, date et nature du prélèvement
 - Données patient : 3 1eres lettres du nom, 1ere lettre du prénom, année de naissance, sexe, code postal de la ville d'origine, date de début des signes cliniques
 - Notion de retour de voyage depuis moins de 15 jours, avec dates, notamment en Angleterre

Envoi des échantillons dès la détection (PCR négative gène S : Kit ThermoFisher).

Nous vous remercions par avance de votre participation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

Bien cordialement,

Le CNR des Virus des Infections Respiratoires, Institut Pasteur et CHU de Lyon