


Compat ella®

Guide d'installation rapide

Ce guide d'installation rapide indique les étapes à suivre lors de la première mise en marche de la pompe de nutrition entérale Compat Ella® et permet de se familiariser avec les différents paramètres et réglages disponibles. Veuillez noter que tous les paramètres et réglages sont automatiquement enregistrés et gardés en mémoire, même lorsque Compat Ella® est éteinte puis redémarrée.


Première utilisation

1 Charger la pompe

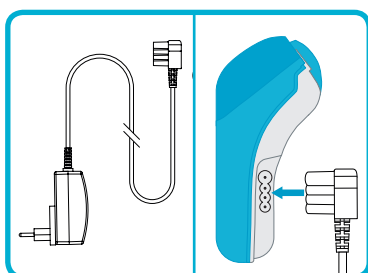


Lors de la première utilisation, il est conseillé de charger la pompe pendant au moins 6 heures.

2 Allumer la pompe

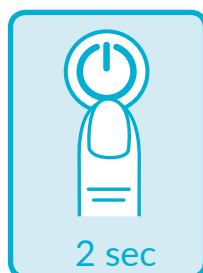


3 Régler la date et l'heure

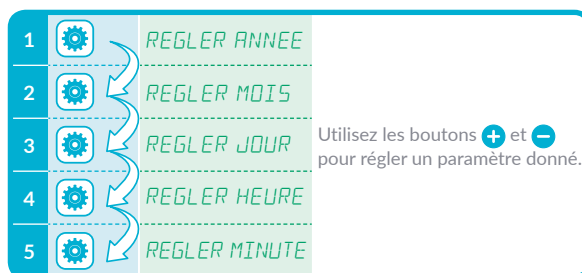

Pour que la pompe puisse garder en mémoire ces réglages, il est essentiel de la charger pendant au moins 20 minutes.

4 Changer la langue

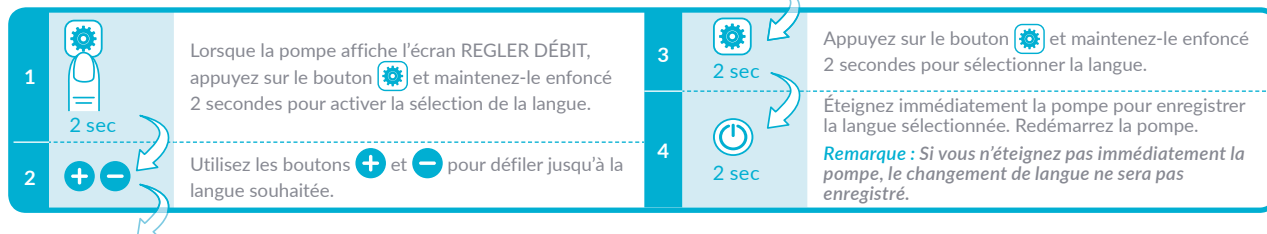

Paramètres utilisateur

À tout moment, appuyez sur  pour consulter et/ou régler les paramètres de la pompe. Utilisez les boutons  et  pour régler tout paramètre donné. Un paramètre est automatiquement gardé en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié.

Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
	VOLUME ALARME	Régler le volume sonore de l'alarme de 1 à 3 (3 = niveau le plus élevé).
	LUMINOSITE	Régler la luminosité de l'écran de 1 à 3 (3 = le plus lumineux)..
	VEILLE ECRAN?	Définir si l'écran se met automatiquement en veille lorsque la pompe est connectée à l'alimentation secteur. QUI : L'écran se met en veille après un délai de 10 secondes. NON : L'écran reste allumé en permanence (non disponible lorsque la pompe fonctionne sur batterie).
	ALARME FIN NUTRITION?	Définir si la pompe avertit ou non l'utilisateur lorsque la nutrition est terminée. QUI : La pompe avertit l'utilisateur. NON : La pompe reste silencieuse.
		Quitter et retourner à l'écran principal.

Découvrez Compat Ella®

Réglages avancés

Précaution : Les paramètres suivants doivent être réglés uniquement par un professionnel de santé qualifié.

Lorsque la pompe est éteinte, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé. Une fois le message **MAINTENIR POUR ALLUMER** affiché à l'écran, appuyez sur le bouton  et maintenez les deux boutons enfoncés pour accéder aux réglages avancés. Appuyez sur  pour faire défiler les réglages avancés. Utilisez les boutons  et  pour régler un paramètre donné. Un paramètre est automatiquement gardé en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié.

Étape	Bouton	Affichage sur l'appareil	Fonction
1		VERROUILLER PARAMETRES? NON OUI	Pour enregistrer la nutrition précédemment programmée comme valeur par défaut et empêcher toute modification par l'utilisateur au cours d'une utilisation normale. NON : Déverrouiller les paramètres de nutrition (Par défaut) OUI : Verrouiller les paramètres de nutrition
2		INTERVALLE OK? OUI NON	Pour activer/désactiver l'utilisation du mode Intervalle. NON : Le mode Intervalle est disponible pour l'utilisateur OUI : Le mode Intervalle n'est PAS disponible pour l'utilisateur
		COMMUNICATION OFF INF PDMS	Pour activer la communication pour l'appel infirmière ou pour la fonction du système de gestion des données patient (PDMS). OFF : Aucune communication INF : La fonction d'appel infirmière est activée. PDMS : La fonction PDMS est activée.
		REGLER ANNEE	Pour régler l'année.
		REGLER MOIS	Pour régler le mois.
		REGLER JOUR	Pour régler le jour.
		REGLER HEURE	Pour régler l'heure.
		REGLER MINUTE	Pour régler les minutes.
		REV	Pour afficher la version du logiciel de la pompe.
		NS	Pour afficher le numéro de série de la pompe.
		VERROUILLER PARAMETRES?	Pour revenir à l'écran VERROUILLER PARAMETRES?
3			Pour éteindre et enregistrer les paramètres.

Réglages d'usine

Dans les réglages avancés, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé 3 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

- Réinitialisation des paramètres de la nutrition :
DEBIT, DOSE, BOLUS, INTERVALLE, DOSE TOTALE
- Réinitialisation des historiques des doses administrées :
DOSE DELIVREE, DOSE CUMULEE DELIVREE
- Réinitialisation des paramètres utilisateurs :
VOLUME ALARME, LUMINOSITE, VEILLE ECRAN ?, ALARME FIN NUTRITION ?, VERROUILLER PARAMETRES ?, INTERVALLE OK ?, COMMUNICATION

Remarque : L'historique des alarmes, la date, l'heure, la langue et l'historique des doses administrées lors des 30 derniers jours sont gardés en mémoire.

Compat Ella® est un dispositif médical pour la nutrition entérale. C'est un produit de santé réglementé, qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce document ne remplace pas le mode d'emploi qui doit être lu avant d'utiliser la pompe et qui est fourni avec chaque nouvelle pompe. En cas de perte du mode d'emploi, contactez votre délégué médical Nestlé Health Science ou un prestataire de services agréé par Nestlé. Le PDF peut également être téléchargé sur www.trainingcentre.compatella.com. Pour les patients qui requièrent un apport nutritionnel constant, utilisez uniquement les solutions de nutrition entérales disponibles sur le marché et assurez-vous d'un suivi régulier et approprié de l'apport en nutriments. Pour utilisation par voie entérale uniquement. Ne pas utiliser par voie intraveineuse.

Nestlé Health Science France - 319543948 RCS Meaux - Destiné aux professionnels de santé - HELLASETUPC316 - 09/2016